

Bienvenue dans le Programme

Elipse™

Ni chirurgie,
Ni endoscopie*,
Ni anesthésie,
Que des résultats**

*Le retrait du Ballon Elipse peut, dans des cas très rares, nécessiter une intervention endoscopique ou chirurgicale.

**Les résultats peuvent varier d'un patient à un autre. Un petit pourcentage de patients ne répond pas au traitement. Ce matériel n'est pas destiné à un public américain. Ce matériel décrit notre produit, dont la commercialisation n'a pas encore été approuvée ou autorisée par la FDA (Food and Drug Administration) aux États-Unis. Notre produit n'est pas disponible à la vente aux États-Unis.


DCO1240

Rev 1

 allurion


APM119-02

Avant de commencer...

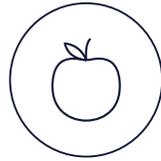


01 Quelles solutions de perte de poids avez-vous déjà essayées ?

02 Quel objectif de perte de poids voulez-vous atteindre avec le Programme Elipse ?

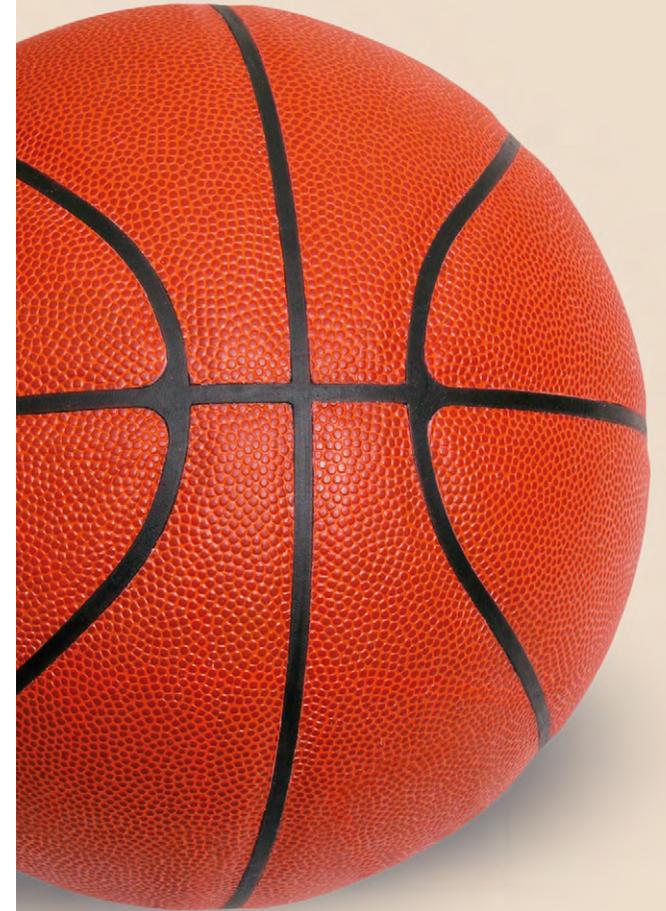

Vous n'êtes pas seul(e)

Surpoids et obésité
Une épidémie mondiale

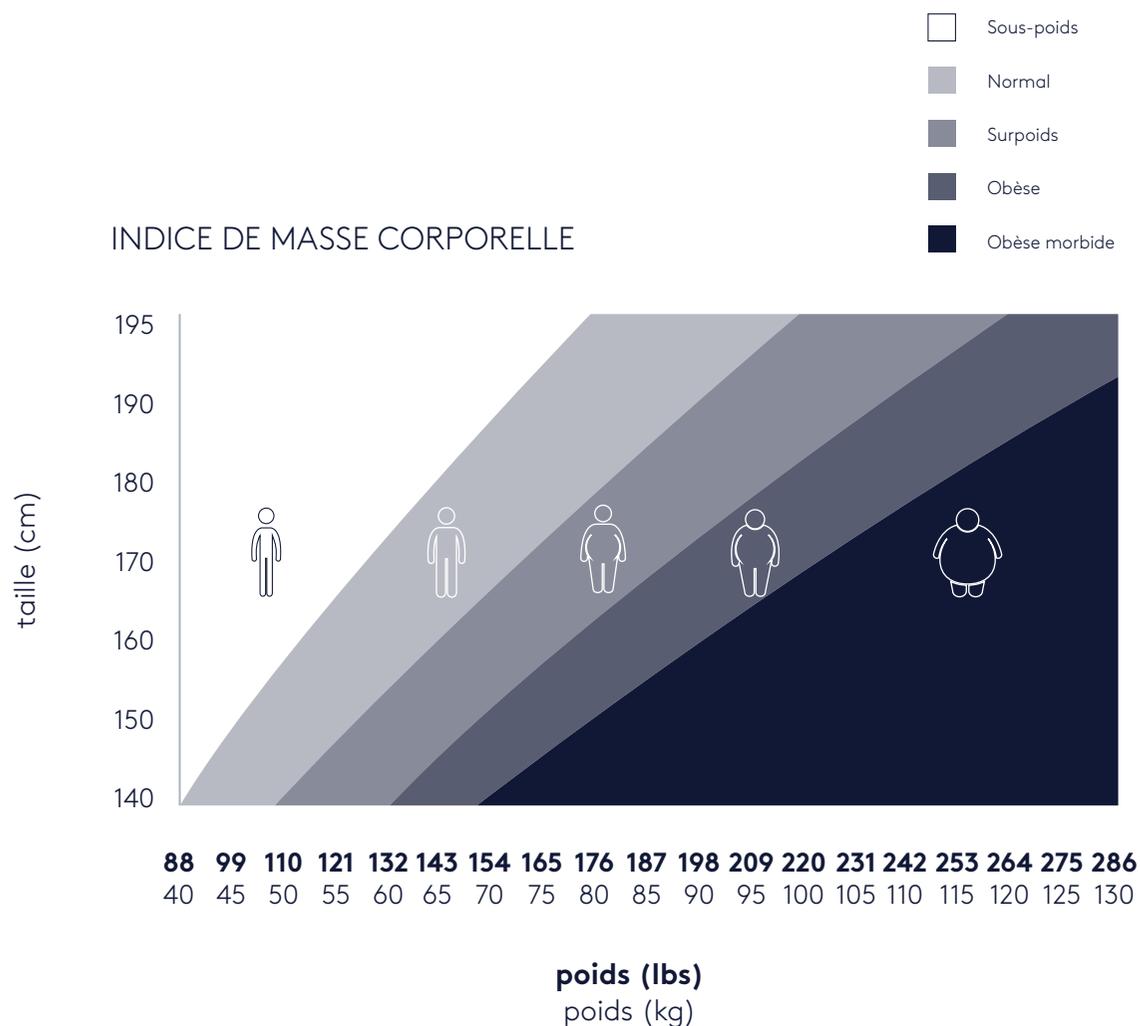


1 personne sur 3


est en surpoids ou obèse
en France, en Italie,
en Allemagne, en Espagne,
au Royaume-Uni,
en Chine et dans les
Émirats Arabes Unis*

Les effets de l'obésité sont multiples

Le surpoids n'a pas seulement un impact sur votre aspect physique et votre moral, mais également sur votre santé

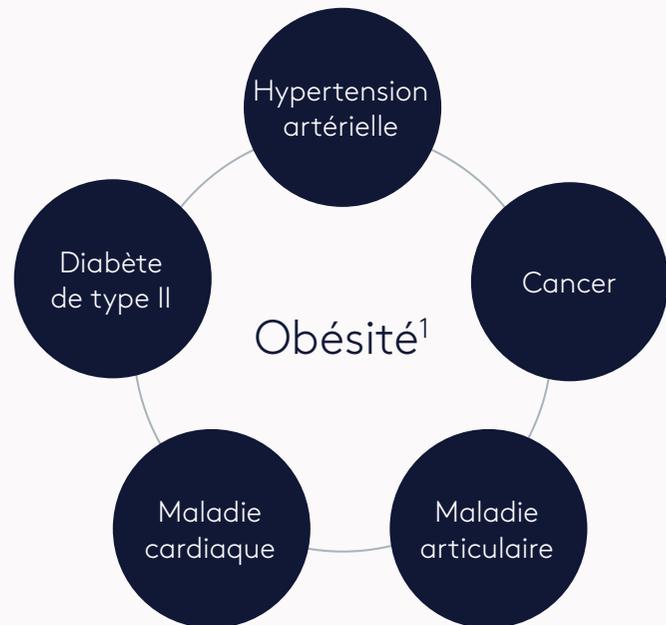

COMPLICATIONS MÉDICALES DE L'OBÉSITÉ

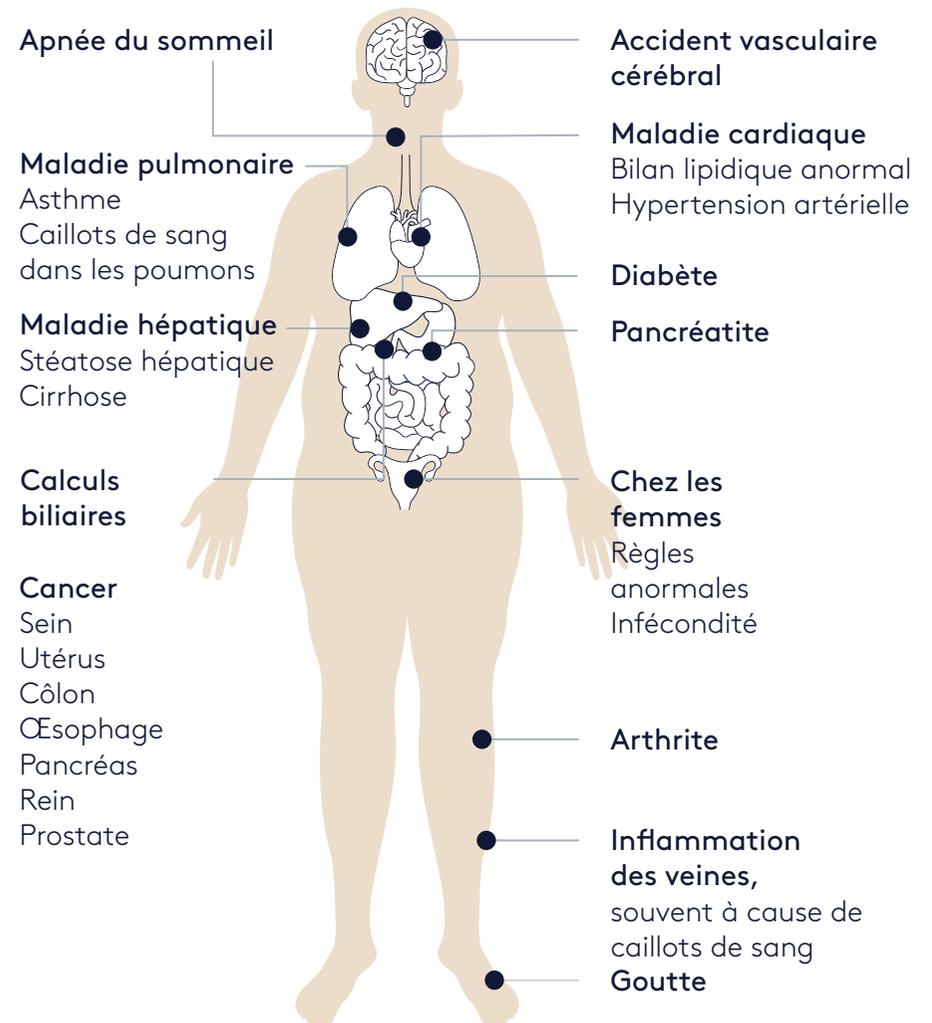


1. 1. Les effets du surpoids et de l'obésité sur la santé <https://www.cdc.gov/healthyweight/effects/index.html>. Dernière consultation le 7 avril 2019

Frustré(e) par les programmes de perte de poids ?

Selon une étude de marché Allurion, la plupart des options de traitements disponibles ne répondent pas aux attentes

SATISFACTION VIS-À-VIS DES SOLUTIONS DE PP

Notées de 1 à 10 - par ceux qui ont eu recours aux solutions suivantes

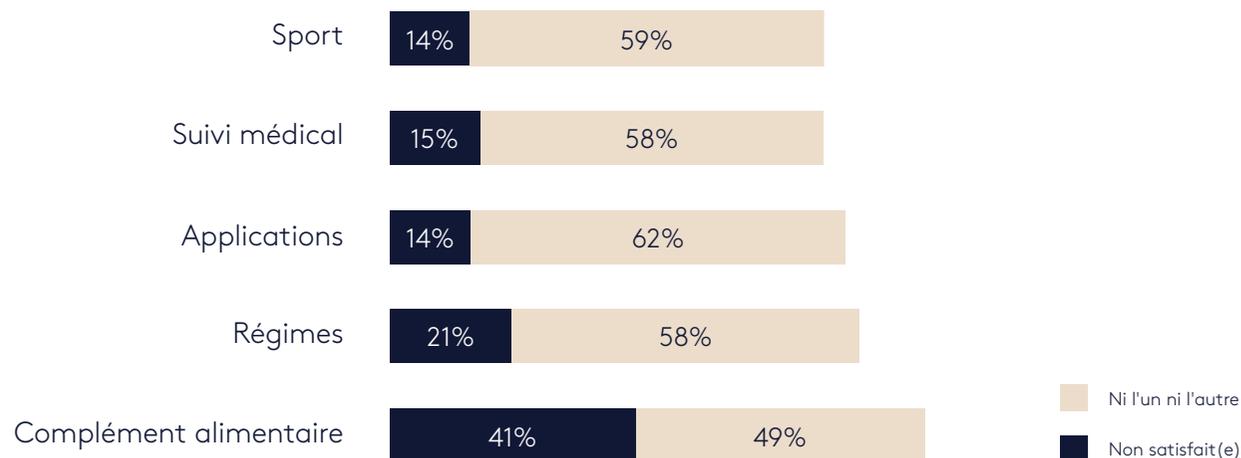

Q10. Qu'attendez-vous d'un traitement de perte de poids suivi par un médecin/prestataire de soins de santé ?
Données globales. Base : n = 2461. Susceptible de demander à un PS une solution qui n'a pas encore été essayée.



76%

ne sont pas pleinement satisfaits des solutions de perte de poids déjà essayées

Étude de marché Allurion ; 9 800 répondants ; 8 zones géographiques ; oct. 2018
Q3C. Sur une échelle de 1 à 10 où 1 correspond à « pas du tout satisfait(e) » et 10 à « extrêmement satisfait(e) », dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de ce qui suit ?
Pensez à votre expérience globale. Niveau global. Base : n = 4831
Satisfait(e) : 8-10/10, ni l'un ni l'autre 4-7/10, insatisfait(e) 1-3/10

Présentation du Programme Elipse

Un programme avec un soutien complet conçu pour vous



Ni
chirurgie

Ni
endoscopie*

Ni
anesthésie

*Le retrait du Ballon Elipse peut, dans des cas très rares, nécessiter une intervention endoscopique ou chirurgicale

De quoi s'agit-il ?

Le programme de perte de poids Elipse a démontré l'efficacité et la commodité d'une mise en place ambulatoire



Au bout d'environ 16 semaines de traitement avec Elipse, les patients perdent en moyenne **10 à 15 kg** et **10 à 15 %** de leur poids corporel^{1 à 10}

1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr;29(4):1236-1241.
2. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182.
3. Al Sabah, S., et al. SOARD. 2018, 14(3), 311-317.
4. Machytka E et al. Endoscopy. 2017 Feb;49(2):154-160.
5. Genco et al. Obes Surg 2017, DOI 10.1007/s11695-017-2877-1
6. Al-Subaie S et al. Int J Surg. 2017 Dec;48:16-22.



Obtenez un soutien pluridisciplinaire pendant votre parcours de perte de poids*

7. Ienca et al. Soumis au SOARD. Abstract A278, présenté à la semaine de l'obésité, 2018, Nashville, É.-U.
8. Genco et al. Soumis au SOARD. Abstract A185, présenté à la semaine de l'obésité, 2018, Nashville, É.-U.
9. Ienca et al. Abstract 237, présenté à l'IFSO 2019, Madrid, Espagne
10. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Présenté à l'ACS 2019, San Francisco, États-Unis.

DCO1240



Découvrez une simplicité révolutionnaire : sans chirurgie, ni endoscopie, ni anesthésie**


*Le Ballon Elipse doit être utilisé en association avec une alimentation surveillée et un programme qui vise à modifier le comportement. Allurion conseille un programme de suivi de 6 mois. Sa durée est définie par le médecin et peut varier en fonction du médecin et du profil du patient.

**Le retrait du Ballon Elipse peut, dans des cas très rares, nécessiter une intervention endoscopique ou chirurgicale.

Rev 1

Comment ça marche ?

Les ballons gastriques induisent la perte de poids en augmentant la satiété, en retardant la vidange gastrique et en réduisant la quantité d'aliments consommés à chaque repas¹

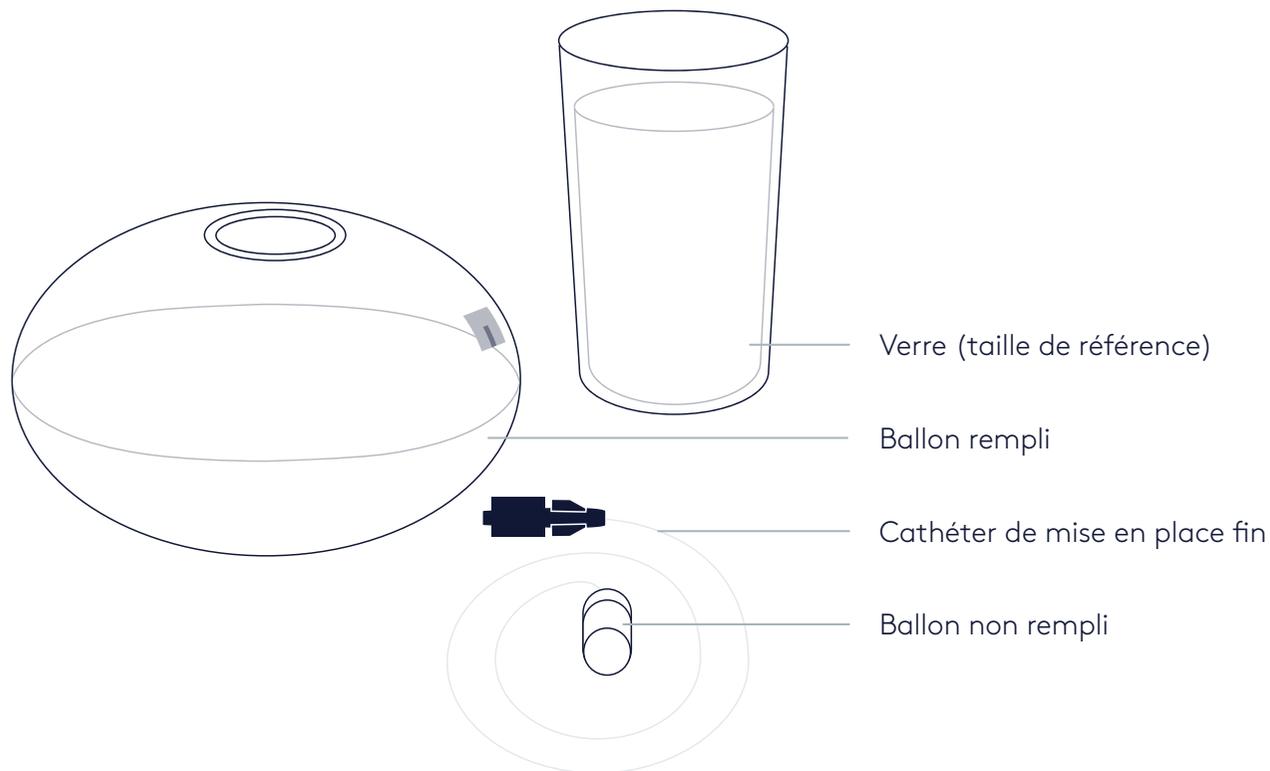


20 min

Le Ballon Elipse est mis en place lors d'une courte procédure ambulatoire de 20 minutes²

Comment ça marche ?


Les ballons gastriques sont la solution rêvée contre la faim¹

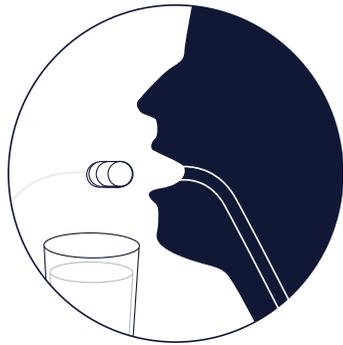

01

Vous avalez une capsule qui contient le ballon relié à un mince cathéter

Vous passerez une radiographie pour vérifier que la capsule est bien en place

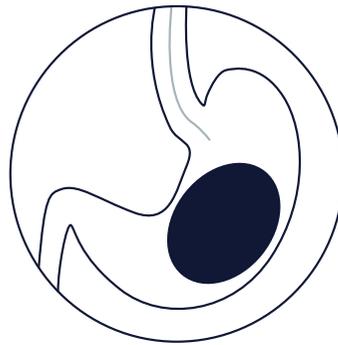


02

Lorsque le ballon sera dans votre estomac, votre médecin utilisera le cathéter pour remplir le ballon de liquide

Vous pouvez passer une deuxième radiographie pour vérifier que le ballon est bien rempli. Le médecin retirera ensuite délicatement le tube et vous serez sur la bonne voie pour perdre du poids

Avec le ballon dans votre estomac, vous pouvez manger moins sans ressentir la faim

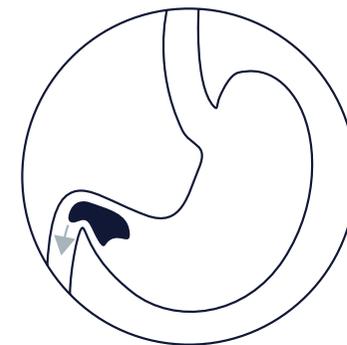

03

Au bout de 16 semaines environ après sa mise en place, le Ballon Elipse se vide de lui-même et est éliminé naturellement^{2*}


1. Citation de Lucy Jones, diététicienne,
<http://www.lucyjonesdietitian.co.uk/>

2. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr;29(4):1236-1241

*Le retrait du Ballon Elipse peut, dans des cas très rares, nécessiter une intervention endoscopique ou chirurgicale. Consultez votre médecin dès aujourd'hui pour savoir si le Programme Elipse est fait pour vous. Vous pouvez également obtenir plus d'informations sur www.allurion.com.

Comment fonctionne le Ballon Elipse ?

Le ballon occupe du volume dans l'estomac et induit la perte de poids en augmentant la satiété, en retardant la vidange gastrique et en réduisant la quantité d'aliments consommés à chaque repas¹

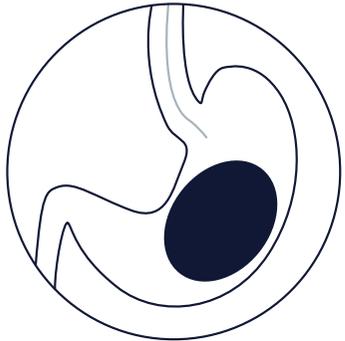

- Vous vous sentez rassasié(e) plus rapidement → De plus petites portions
- Crée une sensation de satiété → Réduire les envies
- Les aliments restent dans votre estomac plus longtemps → Éviter le grignotage

Quel poids pouvez-vous perdre ?



16 semaines

Au bout d'environ **16 semaines** de traitement avec Elipse, les patients ont perdu en moyenne **10 à 15 kg**^{1 à 10}

1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr;29(4):1236-1241.
2. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182.
3. Al Sabah, S., et al. SOARD. 2018, 14(3), 311-317.
4. Machytka E et al. Endoscopy. 2017 Feb;49(2):154-160.
5. Genco et al. Obes Surg 2017, DOI 10.1007/s11695-017-2877-1
6. Al-Subaie S et al. Int J Surg. 2017 Dec;48:16-22.

APM119-02




-15%

ou environ **10 à 15 %** de leur poids corporel total^{1 à 10}

7. Ienca et al. Soumis au SOARD. Abstract A278, présenté à la semaine de l'obésité, 2018, Nashville, É.-U.
8. Genco et al. Soumis au SOARD. Abstract A185, présenté à la semaine de l'obésité, 2018, Nashville, É.-U.
9. Ienca et al. Abstract 237, présenté à l'IFSO 2019, Madrid, Espagne
10. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Présenté à l'ACS 2019, San Francisco, États-Unis.

DCO1240

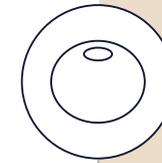

Plus de

15 000

Ballons Elipse ont déjà été mis en place* pour aider des patients en Europe et au Moyen-Orient à atteindre un poids santé**

*En septembre 2019

**Les résultats peuvent varier d'un patient à un autre. Un petit pourcentage de patients ne répond pas au traitement

Rev 1

Un ballon temporaire ne signifie pas une perte de poids temporaire

Perdez du poids et ne le reprenez pas

72%

de la perte de poids moyenne était maintenue

12 mois¹ après la fin du traitement





Une étude clinique incluant 95 patients a montré que 72 % de la perte de poids moyenne obtenue avec Elipse pouvait être maintenue après 12 mois¹

12

Modification des habitudes de vie

Lorsqu'il est associé à une modification durable des habitudes de vie sur 16 semaines, Elipse entraîne une perte de poids significative par rapport à la modification des habitudes de vie seule^{1*}

POURCENTAGE DE PATIENTS ATTEIGNANT UNE PP TOTALE DE 10 % À 16 SEMAINES

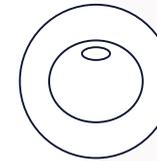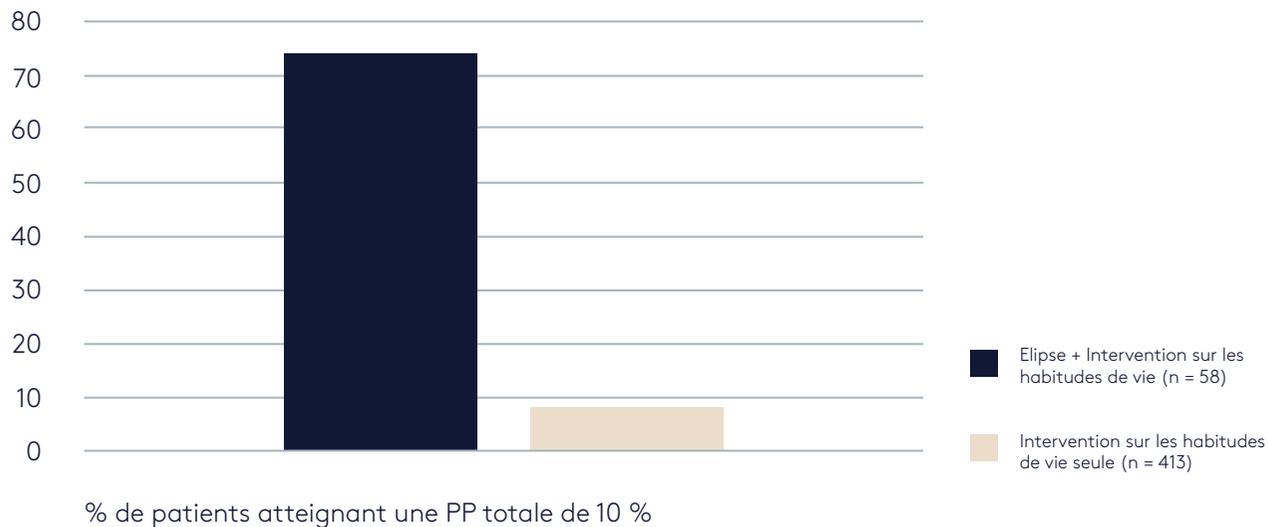

Le changement durable des habitudes de vie implique un programme de modification de l'alimentation, de l'activité physique et des comportements, suivant une planification structurée

1. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Présenté à l'ACS 2019, San Francisco, États-Unis.

*Le Ballon Elipse doit être utilisé en association avec une alimentation surveillée et un programme qui vise à modifier le comportement. Allurion conseille un programme de suivi de 6 mois. Sa durée est définie par le médecin et peut varier en fonction du médecin et du profil du patient.

Soutien d'experts

Le Ballon Elipse est au centre d'un programme de perte de poids pluridisciplinaire



Supervision
de votre médecin



6 mois de coaching
diététique avec
un(e) nutritionniste*



Une balance
« intelligente »
connectée et une
application pour
smartphone pour
suivre vos progrès

*Le Ballon Elipse doit être utilisé en association avec une alimentation surveillée et un programme qui vise à modifier le comportement. Allurion conseille un programme de suivi de 6 mois. Sa durée est définie par le médecin et peut varier en fonction du médecin et du profil du patient.

Dix étapes vers le succès

Elipse est un programme de gestion du mode de vie avec un soutien complet

6 mois :
le programme**



*Les résultats peuvent varier d'un patient à un autre. Un petit pourcentage de patients ne répond pas au traitement
**Le Ballon Elipse doit être utilisé en association avec une alimentation surveillée et un programme qui vise à modifier le comportement. Allurion conseille un programme de suivi de 6 mois. Sa durée est définie par le médecin et peut varier en fonction du médecin et du profil du patient.

1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr;29(4):1236-1241
2. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182.
3. Al Sabah, S., et al. SOARD. 2018, 14(3), 311-317.
4. Machytka E et al. Endoscopy. 2017 Feb;49(2):154-160.
5. Genco et al. Obes Surg 2017, DOI 10.1007/s11695-017-2877-1
6. Al-Subaie S et al. Int J Surg. 2017 Dec;48:16-22.

7. Ienca et al. Soumis au SOARD. Abstract A278, présenté à la semaine de l'obésité, 2018, Nashville, É.-U.
8. Genco et al. Soumis au SOARD. Abstract A185, présenté à la semaine de l'obésité, 2018, Nashville, É.-U.
9. Ienca et al. Abstract 237, présenté à l'IFSO 2019, Madrid, Espagne
10. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Présenté à l'ACS 2019, San Francisco, États-Unis.


Le Programme Elipse

Une solution de perte de poids complète




Restez motivé(e) en surveillant vos progrès chaque semaine

APM119-02

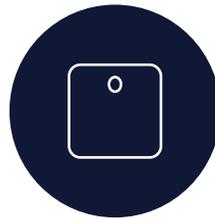

Utilisez la balance sans fil et l'application facile à utiliser pour enregistrer les données en temps réel : IMC, poids, graisse corporelle et bien plus encore

DCO1240

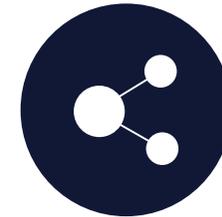

Envoyez vos progrès à votre équipe de coach de suivi, à votre famille et à vos amis

Rev 1

Que demandent les patients ?

**Avez-vous des questions
spécifiques à ce stade ?**


Quelle est l'étendue de l'utilisation du Ballon Elipse ?

- Le Ballon Elipse a été largement testé et de multiples études cliniques démontrent sa sécurité^{1 à 10}
- Il est utilisé dans l'Union européenne depuis 2015



100+

Il est utilisé dans plus de 100 centres de perte de poids en Europe et au Moyen-Orient*

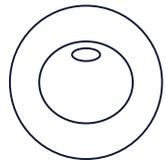

Plus de

15 000

ballons ont été mis en place dans le monde entier*

Contrairement aux autres ballons gastriques, Elipse est le seul qui ne nécessite aucune intervention médicale invasive**



*En septembre 2019

**Le retrait du Ballon Elipse peut, dans des cas très rares, nécessiter une intervention endoscopique ou chirurgicale.

1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr;29(4):1236-1241

2. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182.

3. Al Sabah, S., et al. SOARD. 2018, 14(3), 311-317.

4. Machytka E et al. Endoscopy. 2017 Feb;49(2):154-160.

5. Genco et al. Obes Surg 2017, DOI 10.1007/s11695-017-2877-1


6. Al-Subaie S et al. Int J Surg. 2017 Dec;48:16-22.

7. Ienca et al. Soumis au SOARD. Abstract A278, présenté à la semaine de l'obésité, 2018, Nashville, É.-U.

8. Genco et al. Soumis au SOARD. Abstract A185, présenté à la semaine de l'obésité, 2018, Nashville, É.-U.

9. Ienca et al. Abstract 237, présenté à l'IFSO 2019, Madrid, Espagne

10. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Présenté à l'ACS 2019, San Francisco, États-Unis.

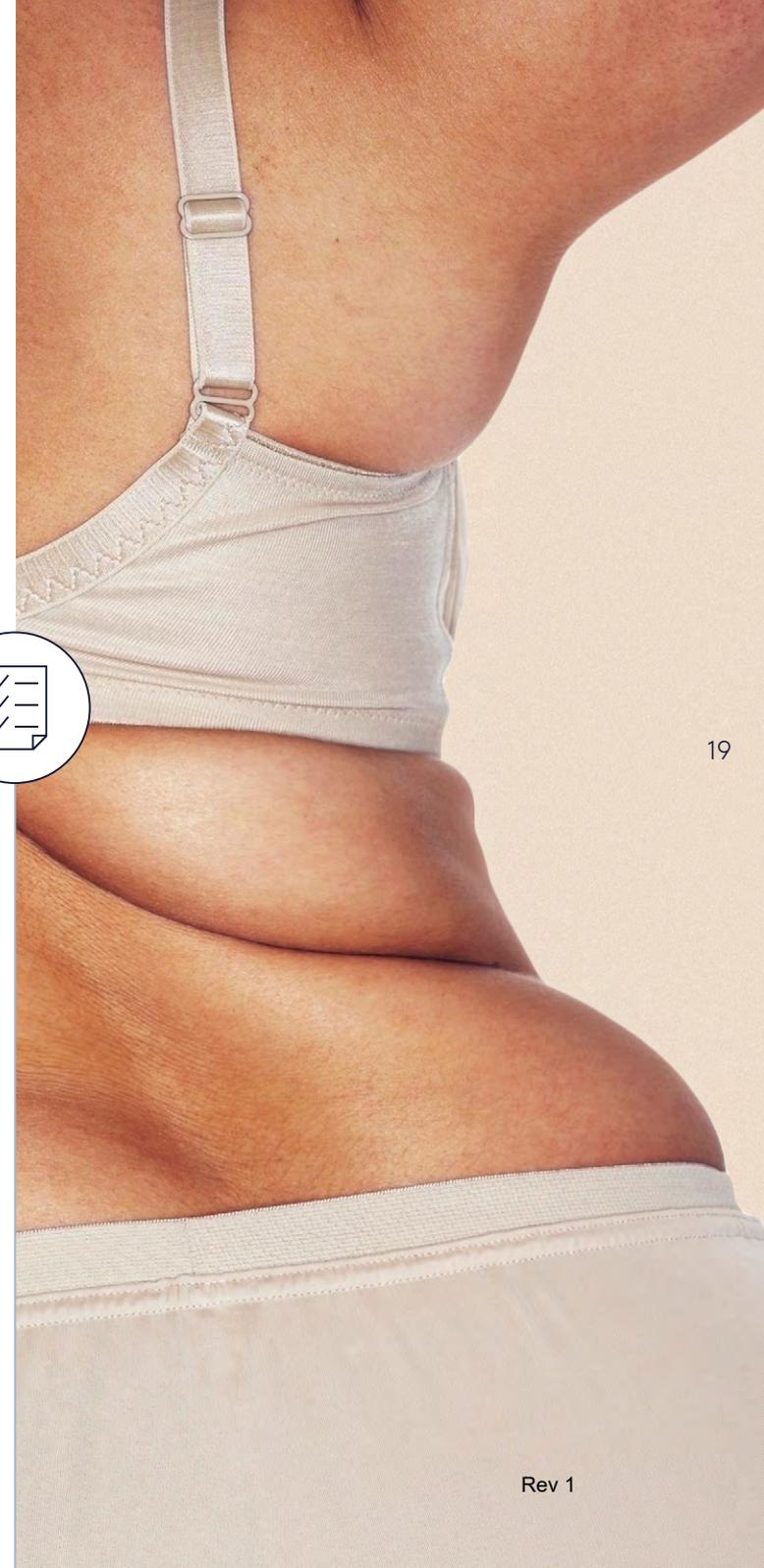


Profil de sécurité d'Elipse

Données de vigilance internes à Allurion

≈ 98%

Aucun événement indésirable signalé

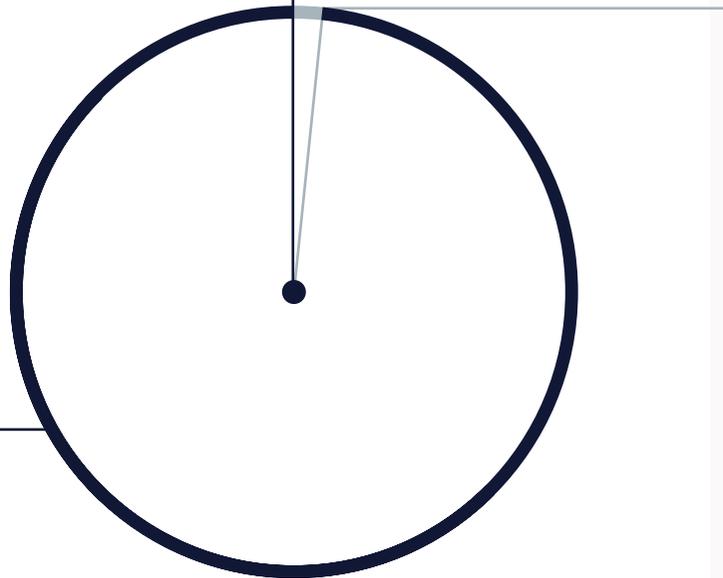

TAUX D'ÉVÈNEMENTS INDÉSIRABLES (%)
MARS 2016 – JUIN 2019

Total d'unités distribuées = 15 200

Le total des événements indésirables signalés était inférieur à 2 % du total des Ballons Elipse mis en place

Les 10 types les plus pertinents

- Dégonflage prématuré 0,43 %
- Intolérance 0,25 %
- Occlusion de l'intestin grêle 0,11 %
- Hyperinflation 0,05 %
- Dysphagie 0,05 %
- Occlusion du défilé gastrique 0,03 %
- Perforation gastrique 0,02 %
- Vidange incomplète du dispositif 0,02 %
- Pancréatite 0,01 %
- Gastroparésie 0,01 %


20

Dans de rares cas, au lieu d'être évacué par le tube digestif, le ballon peut être éliminé en vomissant. Bien que déconcertant pour le patient, le vomissement du ballon n'est à ce jour associé à aucun événement indésirable signalé.

Le retrait du Ballon Elipse peut, dans des cas très rares, nécessiter une intervention endoscopique ou chirurgicale. Certaines personnes peuvent ne pas être en condition de recevoir le Ballon Elipse. Les médecins examinent les antécédents médicaux dans le détail et effectuent un examen physique pour déterminer l'éligibilité du patient. Le Ballon Elipse est une aide temporaire de perte de poids, destinée aux adultes âgés de plus de 18 ans présentant un surpoids ou une obésité, état défini par un indice de masse corporelle (IMC) ≥ 27 . Le Ballon Elipse peut uniquement être mis en place par un professionnel de santé maîtrisant le mode d'utilisation du Ballon Elipse.

Le Ballon Elipse doit être utilisé en association avec une alimentation surveillée et un programme qui vise à modifier le comportement. Allurion conseille un programme de suivi de 6 mois. Sa durée est définie par le médecin et peut varier en fonction du médecin et du profil du patient.

Est-ce facile à avaler ?

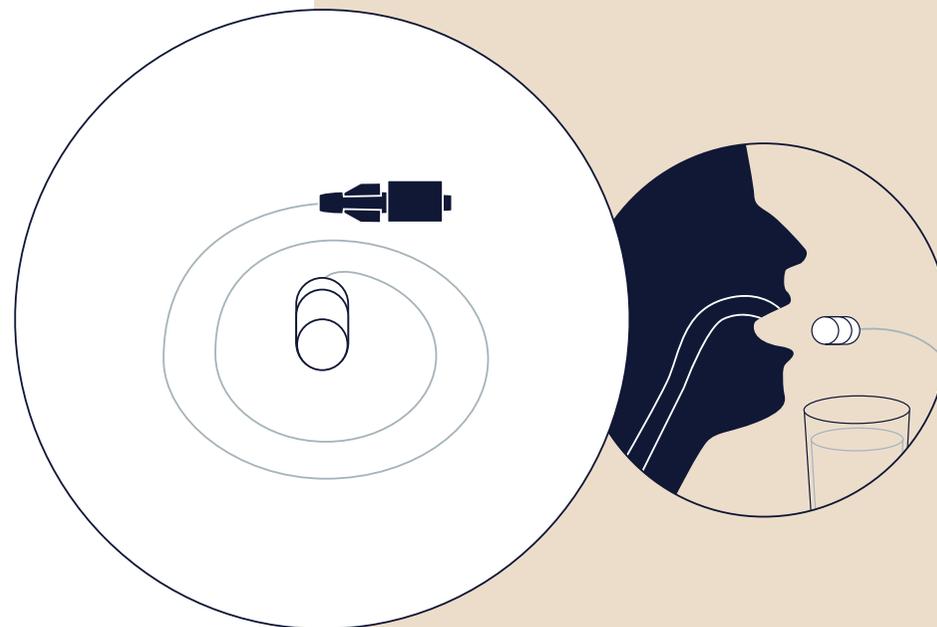

- La plupart des patients réussissent à avaler la capsule¹
- Il existe une possibilité d'ingestion assistée :
- Si vous avez du mal à avaler la capsule, votre médecin pourra vous aider en utilisant un fil-guide fin pour augmenter légèrement la rigidité du cathéter

Dans une récente étude clinique incluant 1623 patients²,

99,9 % des patients ont réussi à avaler le dispositif, l'assistance d'un fil-guide n'ayant été nécessaire que pour 32 % d'entre eux

Combien de temps le ballon restera-t-il dans mon estomac ?

Au bout d'environ

16 semaines,

la valve du ballon, activée par la durée, videra automatiquement le ballon. Celui-ci sera ensuite éliminé naturellement lorsque vous irez aux toilettes^{1*}

Dans une étude,

45%


des patients n'ont pas remarqué l'élimination du ballon¹

*Le retrait du Ballon Elipse peut, dans des cas très rares, nécessiter une intervention endoscopique ou chirurgicale. Consultez votre médecin dès aujourd'hui pour savoir si le Programme Elipse est fait pour vous. Vous pouvez également obtenir plus d'informations sur www.allurion.com.


1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr;29(4):1236-1241



Perte de poids grâce aux ballons gastriques

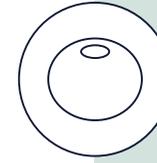

COURBE DE PERTE DE POIDS APRÈS LA MISE EN PLACE DU BALLON IG ORBERA¹

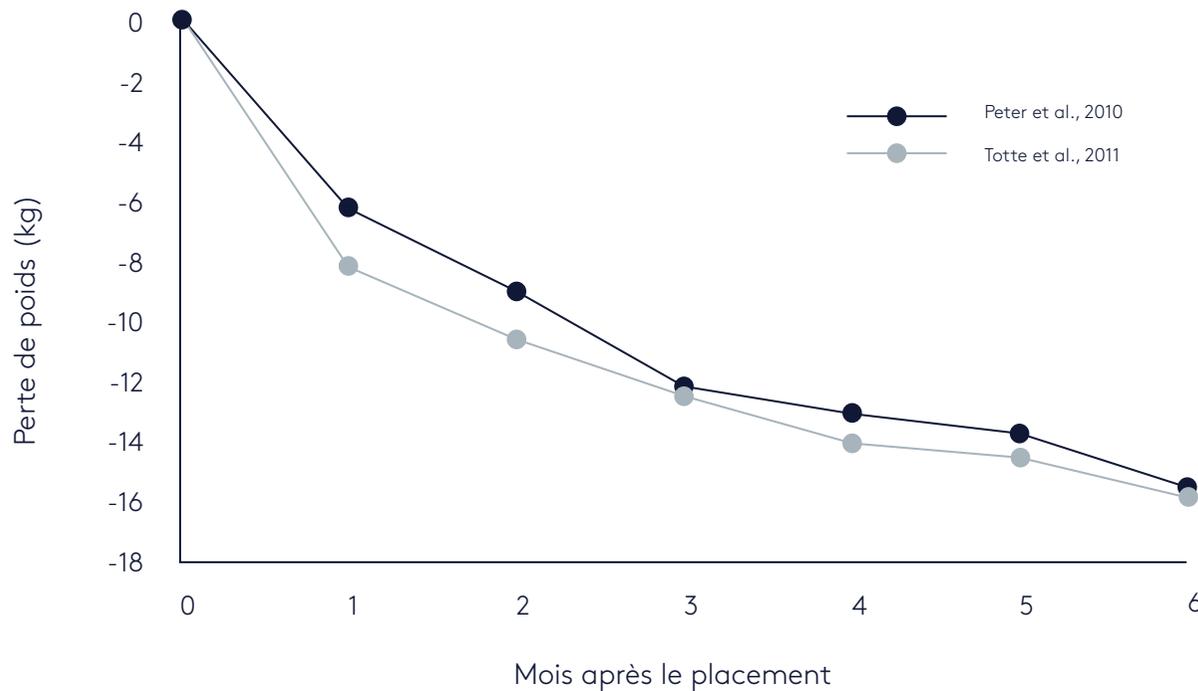

80%

de la perte de poids avec un ballon Orbera mis en place pour 6 mois se produit au cours des trois premiers mois¹

Ces résultats se rapportent au ballon gastrique Orbera

APM119-02

DCO1240

1. Gaur S, et al. Gastrointestinal endoscopy, 2015 81:1330-1336

Rev 1

Est-ce que je reprendrai du poids par la suite ?

Aucun programme de perte de poids n'est magique



Le Programme Elipse est conçu pour vous aider à perdre du poids pendant que vous modifiez votre mode de vie et vos habitudes alimentaires*

*Les résultats peuvent varier d'un patient à un autre. Un petit pourcentage de patients ne répond pas au traitement **Le Ballon Elipse doit être utilisé en association avec une alimentation surveillée et un programme qui vise à modifier le comportement. Allurion conseille un programme de suivi de 6 mois. Sa durée est définie par le médecin et peut varier en fonction du médecin et du profil du patient.



Dans le cadre du programme, votre médecin et votre nutritionniste vous aideront à consolider votre nouveau mode de vie pour augmenter vos chances de ne pas reprendre de poids**

DCO1240

OBTENEZ DES RÉSULTATS RÉELS

24

« Le Programme Elipse a été une expérience très positive pour moi et j'ai continué à perdre du poids après l'élimination du ballon »


Vanessa, Belgique,
est passée d'un IMC de 33,6
à un IMC de 28,5

Rev 1

Dois-je m'attendre à des effets secondaires ?


Les effets secondaires fréquents se produisent généralement pendant la première semaine¹

- Les symptômes peuvent être atténués avec des médicaments prescrits par votre médecin
- La plupart des personnes sont en mesure de reprendre leurs activités normales en quelques jours
- Une étude clinique menée chez 8 506 patients Orbera a révélé que les effets secondaires les plus fréquents étaient²

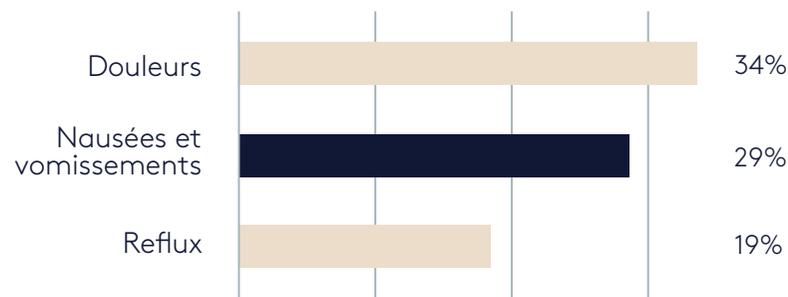

1. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182

2. Abu Dayyeh BK. Gastrointestinal Endoscopy. 2015;82(3):425-438

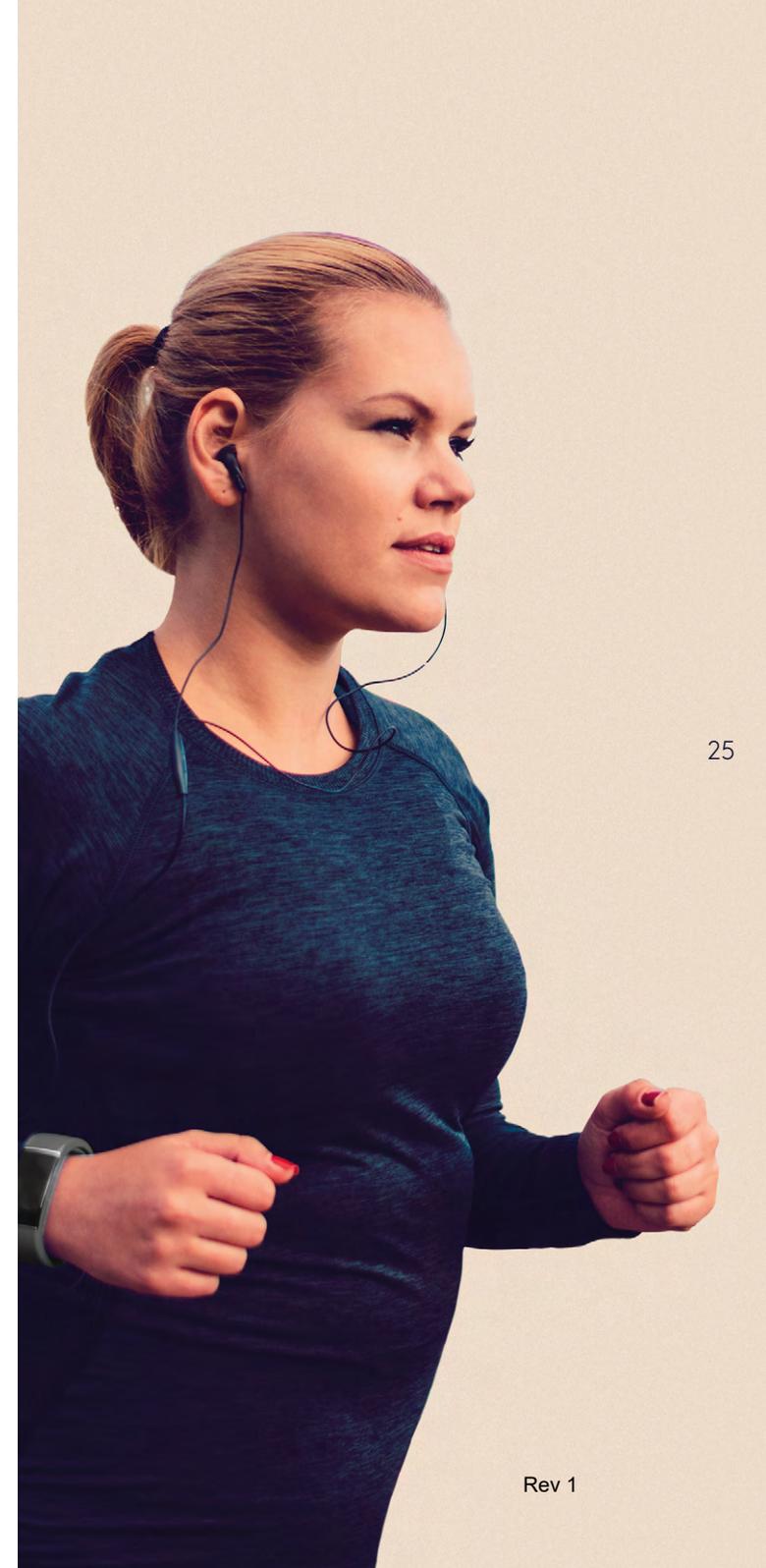

Tirer le maximum du Programme Elipse



26



Avant

Tirer le maximum du Programme Elipse



Votre médecin vous guidera tout au long du processus mais voici quelques conseils

- Certaines personnes souffrent d'effets secondaires après la mise en place du ballon. Les effets secondaires fréquents se produisent généralement pendant la première semaine¹
- Il peut être judicieux de prendre quelques jours de congé après la mise en place du ballon, ou de faire en sorte que le ballon soit mis en place un vendredi pour récupérer pendant le week-end
- Demandez à un(e) ami(e) ou à un membre de la famille d'être disponible si vous avez besoin d'aide pour vos activités domestiques

27




Pendant


Tirer le maximum du Programme Elipse



Suivez vos nouvelles habitudes alimentaires

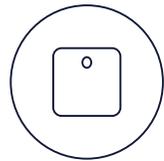

Utilisez votre balance Elipse et l'application pour suivre vos progrès

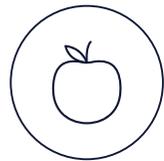

Collaborez étroitement avec votre nutritionniste et votre médecin*



Essayez d'adopter un mode de vie plus sain, de faire régulièrement de l'exercice et de réduire votre consommation d'alcool



Demandez à vos amis et à votre famille de vous aider à bien manger et à rester actif(ve)

*Le Ballon Elipse doit être utilisé en association avec une alimentation surveillée et un programme qui vise à modifier le comportement. Allurion conseille un programme de suivi de 6 mois. Sa durée est définie par le médecin et peut varier en fonction du médecin et du profil du patient.

Après

Tirer le maximum du Programme Elipse



Votre parcours de perte de poids continue après l'élimination du ballon

- Conservez un régime alimentaire sain
- Continuez d'utiliser votre balance Elipse et l'application pour suivre vos progrès
- Essayez de conserver un mode de vie plus sain, notamment en pratiquant une activité physique régulière et en consommant moins d'alcool
- Demandez à votre médecin de vous aider ou de vous donner d'autres conseils
- Rappelez à vos amis et à votre famille que vous devez continuer à bien manger et à rester actif(ve)





Changement de vie

Vanessa, 38 ans, Belgique

-13kg /29lbs*

- Date de mise en place du Ballon Elipse : janvier 2017
- Passée d'un IMC de 33,6 (obèse) à un IMC de 28,5

« La forme physique est importante pour moi en tant que policière. Le Programme Elipse a été une expérience très positive pour moi, et j'ai continué à perdre du poids après l'élimination du ballon* »

Le patient Elipse actuel

*Les résultats peuvent varier d'un patient à un autre. Un petit pourcentage de patients ne répond pas au traitement.

DCO1240

Rev 1

Témoignages

Inspirez les autres : partagez votre histoire de réussite en tant que patient

« Auparavant, j'étais si gros que j'avais beaucoup de difficultés à me déplacer, et il y avait même des jours où je n'arrivais pas à quitter la maison. Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir retrouvé ma vie »

Michael, 67 ans, Royaume-Uni, dans le Daily Mail

« J'ai avalé la capsule sans trop de difficulté ; j'ai eu un peu la nausée, mais rien de plus (...). J'ai perdu des centimètres (63,5 exactement) un peu partout, et je suis maintenant à l'aise dans une taille 44 »

Kayleigh, 28 ans, Royaume-Uni, dans le Daily Mail ; Spire Thames Valley, Dr Humadi

« Ça a été fantastique (...). J'ai perdu 8 kilos en 4 semaines, j'ai retrouvé mon énergie et ma confiance en moi et je rentre dans des vêtements que je ne portais plus depuis 3 ans ! »

Hetsie, 42 ans, Royaume-Uni, sur Channel 44

« J'allais devenir obèse (...). J'ai terminé le traitement il y a 6 mois mais je continue à me sentir rassasiée plus rapidement qu'auparavant. (...) J'ai perdu 20 kilos grâce au Ballon Elipse »

Véronique, 50 ans, France, dans Femme Actuelle



The Guardian

Femme actuelle

Daily Mail

ella/you

Discovery CHANNEL

EL MUNDO

Le patient Elipse actuel

*Les résultats peuvent varier d'un patient à un autre. Un petit pourcentage de patients ne répond pas au traitement.

APM119-02

DCO1240

Cinq points à retenir



01

Votre médecin déterminera si le Programme Elipse est fait pour vous

1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr; 29(4): 1236-1241
2. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182.
3. Al Sabah, S., et al. SOARD. 2018, 14(3), 311-317.
4. Machytka E et al. Endoscopy. 2017 Feb; 49(2): 154-160.
APM119-02



02

Les ballons gastriques ne sont pas une solution miracle. Ils exigent des changements durables du mode de vie

5. Genco et al. Obes Surg 2017, DOI 10.1007/s11695-017-2877-1
6. Al-Subaie S et al. Int J Surg. 2017 Dec; 48:16-22.
7. Ienca et al. Soumis au SOARD. Abstract A278, présenté à la semaine de l'obésité, 2018, Nashville, É.-U.



03

Au bout d'environ 16 semaines de traitement par Elipse, les patients perdent en moyenne 10 à 15 kg ou environ 10 à 15 % de leur poids corporel total^{1 à 10}

8. Genco et al. Soumis au SOARD. Abstract A185, présenté à la semaine de l'obésité, 2018, Nashville, É.-U.
9. Ienca et al. Abstract 237, présenté à l'IFSO 2019, Madrid, Espagne
10. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Présenté à l'ACS 2019, San Francisco, États-Unis.
DCO1240



04

Obtenez un soutien pluridisciplinaire pendant votre parcours de perte de poids*

*Le Ballon Elipse doit être utilisé en association avec une alimentation surveillée et un programme qui vise à modifier le comportement. Allurion conseille un programme de suivi de 6 mois. Sa durée est définie par le médecin et peut varier en fonction du médecin et du profil du patient.



05

Découvrez une simplicité révolutionnaire : sans chirurgie, ni endoscopie, ni anesthésie**

**Le retrait du Ballon Elipse peut, dans des cas très rares, nécessiter une intervention endoscopique ou chirurgicale.

Rev 1

Commencez votre parcours de perte de poids, Participez au Programme Elipse